



MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION **COCAINE / CRACK** ETAPE 1 : DETECTION CATALOGUE N°. IDT1000

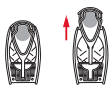

A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identia.

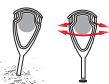

B) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester, en essayant d'en recueillir le plus possible.



C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Avec le Pouce et l'Index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



E) Agiter doucement l'unité pendant 2 à 3 secondes.



F) L'apparition d'une couleur turquoise sur particules présentes à l'extrémité de la languette indique la présence de **COCAÏNE**.

OPTION DE CONFIRMATION (cette partie est optionnelle) : pour confirmer la présence de **COCAÏNE** utiliser le **KIT 2 COCAÏNE/CRACK**



G) Si aucune couleur n'apparaît, briser l'ampoule de la **chambre 2**.



H) Agiter pendant 1 seconde



I) L'apparition d'une couleur turquoise sur particules présentes à l'extrémité de la languette indique la présence de **CRACK**.

OPTION DE CONFIRMATION (cette partie est optionnelle) : pour confirmer la présence de **CRACK** utiliser le **KIT 2 COCAÏNE/CRACK**

J) Si aucune couleur turquoise n'apparaît, ni cocaïne, ni crack ne sont présents.

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.