



MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION FLUNITRAZEPAM / BENZODIAZEPINES CATALOGUE N° IDT0350

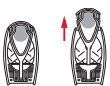

A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.

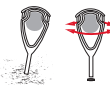

B) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur sur la substance à tester (la poudre) ou visser sur le comprimé à tester, en essayant d'en recueillir le plus possible.



C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



E) Agiter doucement l'unité de test quelques secondes



I) Une **couleur rouge pourpre profond** dans la fenêtre indique la présence de **Flunitrazepam**.



Une **couleur jaune** indique la présence possible de **Nitrazepam, Clonazepam ou Nimetazepam**.



Une **couleur verte** indique la présence possible de **Lorazepam ou Temazepam**

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.