


MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION DROGUE GÉNÉRALE CATALOGUE N°. IDT9000


Ne pas utiliser sur des comprimés ou des plantes ; usage sur de la poudre uniquement. La seule drogue n'étant pas détectée par le test général étant la MARIJUANA, compléter l'analyse en utilisant le test IDENTA STINGER MARIJUANA (IDT 3000)

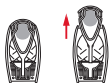

A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.



B) Appliquer la tête de l'échantillonneur sur la substance à tester (en essayant d'en recueillir le plus possible)

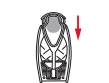

C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



Agiter doucement l'unité de test pendant quelques secondes.



Si une **couleur rouge-violet** se développe après avoir cassé la première ampoule, cela confirme la **présence d'HEROINE** dans la substance



Si une **couleur verte** se développe, cela indique la **présence de CRACK**. Confirmer le résultat en utilisant le kit COCAINE/CRACK (CAT. N° IDT1000)



F) Avec le Pouce et l'Index, appuyer fermement sur la **chambre 2** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



Agiter doucement l'unité de test pendant quelques secondes.



Si une **couleur rouge-violet** se développe après avoir cassé la seconde ampoule, cela confirme la présence d'une **drogue suspecte**



Si une **couleur verte** se développe, le test indique la présence de **COCAINE** (Confirmer le résultat en utilisant le kit COCAINE/CRACK (CAT. N° IDT1000)

Si **aucune couleur** ne se développe, **aucune drogue** ci-après n'est à déplorer : Héroïne, Cocaine-crack, Méthamphétamine, amphétamine, MDMA, éphédrine, LSD, Méthadone, Kétamine, PCP, Pentazocine, Propoxyphène, PMA, Oxycodone, AMT, DMT, Mescaline, Pethidine.

Compléter l'analyse en utilisant le kit MARIJUANA IDT 3000

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.



ISIS ANALYTICS : 88 rue Hippolyte Kahn - 69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110 - contact@isisanalytics.com

HOTLINE : +33(0)478 924 118