


MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION KETAMINE SOLIDE CATALOGUE N°. IDT7000



A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.

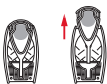

B) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester (la poudre) ou visser « des deux côtés » sur le comprimé à tester, en essayant d'en recueillir le plus possible.



C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Avec le pouce et l'index, presser fortement la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se casse.



E) Agiter doucement l'unité de test quelques secondes (aucune couleur n'apparaît à ce stade).



F) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 2** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



H) Agiter doucement l'unité de test quelques secondes (aucune couleur n'apparaît non plus à ce stade).



I) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 3** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



J) Agiter doucement l'unité de test quelques secondes.



K) Une couleur lavande à pourpre dans la fenêtre indique la présence de KETAMINE.

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.