


## MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION LSD CATALOGUE N°. IDTB000

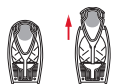

**A)** Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Ident.



**B)** Rouler la substance suspecte (comme un timbre) et l'insérer dans le trou de la chambre à réaction



**ou** visser « des deux côtés » du comprimé à tester en essayant d'en recueillir le plus possible.



**C)** Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.




**Avertissement :** Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



**D)** Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



**E)** Agiter doucement l'unité de test environ 20 secondes (à ce stade aucune couleur n'apparaît).

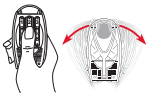

**F)** Casser l'ampoule de la **chambre 2** et agiter quelques secondes.



**G)** Une couleur violette pourpre dans la fenêtre indique la présence de LSD.

**Note :** Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.