


MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION MARIJUANA / HASHISH CATALOGUE N°. IDT3000



A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Iidenta.

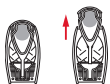

B) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester en essayant d'en recueillir le plus possible.



C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



E) Agiter doucement l'unité pendant une minute (à ce stade, aucune couleur n'apparaît).



F) Briser l'ampoule de la **chambre 2** et agiter pendant quelques secondes.




G) Une couleur bleu-violet indique la présence de marijuana ou de hachisch.

Remarque : Si les drogues sont de mauvaise qualité, la couleur apparaîtra alors graduellement sur plus d'une minute .

Si cette couleur apparaît, passez à l'étape H pour confirmer la présence de marijuana ou haschisch.

Si elle n'apparaît pas, ni la marijuana ni le hachisch ne sont présents.

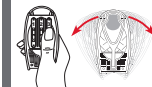

H) Briser l'ampoule de la **chambre 3** et agiter doucement.

Tenir fermement, autorisant aux niveaux à se séparer. 2 niveaux de liquide vont se former. Si le **niveau inférieur devient d'une couleur bleu-violet**, la présence de marijuana ou de hachisch est confirmée.

Note : La couleur peut foncer avec le temps



Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.



ISIS ANALYTICS : 98 rue Hippolyte Kahn - 69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110 - contact@isisanalytics.com

HOTLINE : +33(0)478 924 118