


## MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION MORPHINE CATALOGUE N°. IDT0450

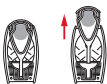

**A)** Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.



**B)** Pour les comprimés : presser fermement l'échantillonneur sur le cachet et le frotter vigoureusement avec un mouvement de rotation, jusqu'à ce que la pointe gaufrée soit remplie de substance.



Pour les capsules : presser la tête adhésive dans la capsule, pour récupérer le maximum de substance



Pour le liquide : remplir la pipette fournie du liquide à tester dans le trou de l'unité de test. (minimum 1 gouttes et maximum 2 gouttes de liquide).



**C)** Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



**Avertissement :** Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



**D)** Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



**pour les comprimés ou les capsules :** si des particules violettes/pourpres apparaissent autour de l'échantillonneur, cela indique la présence de morphine



**pour le liquide :** si une couleur violette/pourpre apparaît immédiatement, cela indique la présence de Morphine.



**Avertissement :** Procéder ensuite à la phase de neutralisation, qu'il y ait ou pas de réaction positive.



**E)** Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur l'**ampoule 2** jusqu'à ce qu'elle se brise.



Agiter doucement 2-3 secondes  
**Important : Attendre 5 minutes !**



**F)** Avec le pouce et l'index presser fermement la **chambre 3** jusqu'à ce que l'ampoule se casse.



Agiter doucement pour compléter la neutralisation de l'acide. La fenêtre du test deviendra un peu chaude. C'est une phase normale du processus de neutralisation.

**Note :** Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.